



BLADDER SCAN BVI 6100

BVI 6100 är liten och smidig, gör snabb och noggrann mätning, lätt att lära sig och enkel att använda.

En portabel och användarvänlig ultraljudsapparat som snabbt och noggrant mäter volymen i blåsan. Risken för urinvägsinfektion undviks då inga onödiga kateteriseringar behöver göras, samtidigt som vårdtagaren slipper obehag i samband med dessa. En snabb och lätt undersökning för både vårdtagare och personal.

BVI 6100 är en liten handhållen modell. Apparatens storlek gör att den är mycket lätt att ha med sig på t ex hembesök. BVI 6100 är klar att användas direkt när den tas ur laddaren. Ingen tid går åt för uppstart av apparaten.

BVI 6100 har en display som visar hur stor volymen är och hur den har fångats. På displayen presenteras också, med hjälp av pilar, hur apparaten ska riktas för att en optimal träff ska uppnås.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- ➔ Vid mätning av residualurin och vid misstänkt urinstämning
- ➔ Vid inkontinensutredning och vid misstänkt kateterstopp
- ➔ Hjälper vid blåsträngning och vid utvärdering av läkemedelsbehandling

TEKNISK SPECIFIKATION

- Vikt 340 g, Storlek B 6 cm. H 19 cm, L 9 cm
- Batteri 3.8V Li Ion, fulladdat batteri ger 5 timmars användande
- Noggrannhet $\pm 15\%$, ± 15 ml i intervallet 0-999 ml
- Mätområde, 0-999 ml
- Scanningstid 3 sek
- Scanningfrekvens 3.7 MHz
- Scanvinkel 120°
- Scandjup > 15 cm
- 3D volymetrisk probe, B-mode sampling
- LCD skärm, gråskala
- Precisionssikte på apparatens LCD-skärm
- Kalibrering och uppdatering via Internet



Med BladderScan tillgänglig görs fler blåsvolymsmätningar än tidigare. Det innebär en bättre kontroll, ökad vårdkvalitet och höjd säkerhet för både vårdtagare och personal. För ytterligare information: www.bladderscan.se